

INDOXYLstrip



EAN-Code: 8595635303395 Katalognummer: ls0100 Verpackungsgröße: 100 tests

Lagerung: 2-8 °C

Hersteller: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Beschreibung:

- INDOXYLstrip ist ein Test zum Nachweis der Acetat-Esterase-Aktivität von Mikroorganismen. Der Test basiert auf der Reaktion freier Indoxylgruppen mit Sauerstoff, die zu einer Farbänderung führt. Acetat-Esterase-Aktivität ist vorhanden z.B. in Campylobacter spp. und in Branhamella catarrhalis. Der Test eignet sich für Screening-Untersuchungen und zur Identifizierung verdächtiger mikrobieller Kolonien.
- Haltbarkeit: 24 Monate.

Anwendung:

• Mikrobiologischer Diagnosetest zum schnellen Nachweis der Acetatesterase-Aktivität von Moraxella (Branhamella) catarrhalis und anderen Mikroorganismen.

Assay-Schnellverfahren:

- 1. Wischen Sie nach dem Wachstum von 18-24 h mehrere Bakterienkolonien von einer Petrischale mit der aktiven Papierzone des Diagnosestreifens ab.
- 2. Lesen Sie das Ergebnis nach 3-5 Minuten ab.
- 3. Ergebnisse auswerten

Exportováno 30. 11. 2025 Stránka 1 / 1