

OXIstrip



EAN-Code: 8595635303456 Katalognummer: Os0100 Verpackungsgröße: 100 tests

Lagerung: 2-8 °C

Hersteller: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Beschreibung:

- OXIstrip ist ein Test, der das Vorhandensein der Cytochromoxidase-Aktivität von Mikroorganismen nachweist. Der Test basiert auf der Reaktion von N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamin und α-Naphtol mit der mikrobiellen Cytochromoxidase, die zur Produktion von Indophenolblau führt. Cytochrom-Oxidase-Aktivität ist vorhanden, z. in den Gattungen Neisseria und Pseudomonas. Der Test eignet sich für Screening-Untersuchungen und zur Identifizierung verdächtiger mikrobieller Kolonien.
- Das Ergebnis der Reaktion wird nach 1 min abgelesen.
- Haltbarkeit: 24 Monate.

Anwendung:

 Mikrobiologischer Diagnosetest zum schnellen Nachweis der Cytochromoxidase-Aktivität von Mikroorganismen.

Assay-Schnellverfahren:

- 1. Wischen Sie mit der aktiven Papierzone des Diagnosestreifens mehrere Bakterienkolonien von einer Petrischale ab.
- 2. Lesen Sie das Ergebnis nach 1 Minuten ab.
- 3. Ergebnisse auswerten