

PYRstrip



EAN-Code: 8595635303463 Katalognummer: Ps0050 Verpackungsgröße: 50 tests

Lagerung: 2-8 °C

Hersteller: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Beschreibung:

- PYRstrip ist ein enzymatischer Test zum Nachweis von Pyrrolidonylpeptidase (PYRase), einem Enzym, das von allen g\u00e4ngigen Enterokokkenarten und 98 % der St\u00e4mme von S. pyogenes produziert wird. Der Nachweis von PYRase ist eine empfindliche, zuverl\u00e4ssige und schnelle Methode mit breiter Anwendung. Er ist wesentlich besser geeignet als Tests mit Bacitracin-Scheiben zur Differenzierung von S. pyogenes-St\u00e4mmen und Tests zur Gruppierung von Enterokokken. PYRstrip kann auch zur Identifizierung von G+ Gattungen, Katalase-negativen Kokken und Kokkobazillen verwendet werden.
- Das Kit ermöglicht 50 Stk.
- Haltbarkeit: 24 Monate.

Anwendung:

 Mikrobiologischer Diagnosetest zur schnellen Unterscheidung zwischen Enterokokken und Streptokokken der Gruppe D sowie zwischen Streprococcus pyogenes-Stämmen und anderen hämolytischen Streptokokken.

Assay-Schnellverfahren:

- 1. Wischen Sie mit der aktiven Papierzone des Diagnosestreifens mehrere Bakterienkolonien von einer Petrischale ab.
- 2. Nach 5min. ca. 5 µl Entwicklungsreagenz mit Plastiköse oder Mikropipettenspitze auf die

Exportováno 30. 11. 2025 Stránka 1 / 2





Papierzone auftragen.

3. Ergebnisse auswerten

Exportováno 30. 11. 2025 Stránka 2 / 2