

## TRIBUstrip



**EAN-Code:** 8595635303593

**Katalognummer:** Ts0300

**Verpackungsgröße:** 300 tests

**Lagerung:** 2-8 °C

**Hersteller:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

### Beschreibung:

- Das Testprinzip ist eine enzymatische Hydrolyse von Tributyrin. Diese Reaktion verursacht eine Farbänderung des sauren basischen Indikators.
- Das Kit ermöglicht 300 Stk.
- Haltbarkeit: 24 Monate.

### Anwendung:

- Mikrobiologischer Diagnosetest zur Unterscheidung zwischen Moraxella (Branhamella) und der Gattung Neisseria.

### Assay-Schnellverfahren:

1. Werfen Sie einen Tributyrin-Streifen in die Suspension des getesteten Stamms in 1 ml gepufferter Kochsalzlösung.
2. Inkubieren Sie die getestete Probe bei 37 °C (ohne CO<sub>2</sub>).
3. Lesen Sie die endgültigen Ergebnisse nach 18-20 h.
4. Ergebnisse auswerten